

## Инструкция по использованию сепаратора

### ISOSEP OIL<sup>®</sup>.



ISOSEP OIL<sup>®</sup> (арт. 55503) - ультратонкий сепаратор для инъекционного формования, предназначен специально для Perflex T-CRYSTAL<sup>®</sup> и Perflex BIOSENS<sup>®</sup>. Делает поверхность зубного протеза и аппарат после инъекции гладким и чистым. Также подходит для покрытия очень тонким слоем с помощью мягкой кисточки в качестве окончательного глазурного покрытия после обработки и полировки.

**ИНСТРУКЦИЯ:** При использовании сепаратора для инъекций Perflex T-CRYSTAL<sup>®</sup> и Perflex BIOSENS<sup>®</sup>:

Извлеките 2 половины кюветы из кипящей воды, примерно, за 8 минут до инъекции, удалите остатки воды сжатым воздухом, нанесите тонким слоем ISOSEP FILM<sup>®</sup> (арт. 55501) на поверхности формы мягкой кисточкой дважды на каждую половину кюветы только в области протеза, подождите минуту, пока покрытие высохнет, затем нанесите 1 тонкий слой ISOSEP OIL<sup>®</sup> (арт. 55503) - 3-4 капли на каждую половину, равномерно распределите по поверхности другой мягкой кисточкой только в области протеза.

Закройте кювету для инъекции, закрутите 4 винта со средним усилием; поместите в инъекционный термопресс SMART 101- 400 (арт. 7000) за 4 минуты до инъекции.

**ВНИМАНИЕ:** Избыток сепаратора ISOSEP OIL<sup>®</sup> (арт. 55503) может привести к сепарации материала в зонах инъекции, где была сделана очень тонкая восковая моделировка. Убедитесь в том, что нанесены очень тонкие слои.

**ОСТОРОЖНО:** Во время процесса используйте защитные теплоустойчивые перчатки. При использовании в качестве окончательного глазурного покрытия всех термопластичных и обычных акриловых материалов.

*После нанесения окончательного покрытия и полировки проведите 15-минутную чистку и дезинфекцию ультразвуком от остатков полировочных материалов. Высушите аппарат сжатым воздухом и нанесите тонкий слой маленькой мягкой кисточкой внутри и снаружи аппарата.*

**ВНИМАНИЕ:** Не наносить на зоны, где применяется акриловая перебазировка, на съемных протезах, временных протезах или имплантатах.  
Хранить в прохладном темном сухом месте, защищать от солнца.

объем: 150 мл  
Номер по каталогу: 55503

По всем интересующим Вас вопросам  
обращайтесь в компанию ООО «Перфлекс Рус»  
E-mail: office@perflexrussia.ru;  
8-800-500-36-60 (звонок по РФ бесплатный)