

Инструкция по использованию FUSE REPAIR LIQUID[®].



Perflex FUSE[®] (арт. 55701) является связующей жидкостью (праймером).

Используется для ремонта съемных зубных протезов из полиамида.

ИНСТРУКЦИЯ:

Связующая жидкость используется при ремонте или дополнении готового съемного зубного протеза, для связи с повторно инжeksiруемой новой частью материала в существующий зубной протез в горячую кювету.

- Используется только при инъекции в кювету нового материала.
- Является праймером для термопластов для Perflex T-CRYSTAL[®], Perflex BIOSENS[®] и Perflex FLEXINYLON[®] в системе термолитьевого формования.

ВНИМАНИЕ: не наносить на акрил!

По всем интересующим Вас вопросам
обращайтесь в компанию ООО «Перфлекс Рус»
E-mail: office@perflexrussia.ru;
8-800-500-36-60 (звонок по РФ бесплатный)